



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

VĂN PHÒNG

COLDISEPT EAR DROPS

Thành phần:

Nano bạc và nano đồng, glycerin, propylene glycol, nước tinh khiết.

Mô tả sản phẩm:

COLDISEPT EAR DROPS là thiết bị y tế dưới dạng dung dịch nhỏ tai được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm ống thính giác bên ngoài do nhiễm vi khuẩn và nấm. Sản phẩm được thiết kế để đưa vào ống thính giác bên ngoài giúp làm mềm và loại bỏ bất kỳ tạp chất nào và tạo hàng rào bảo vệ trên bề mặt da. Sản phẩm có chứa các phân tử nano bạc và đồng có tác dụng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm, hỗ trợ điều trị viêm tai ngoài do nhiều nguyên nhân khác nhau.

COLDISEPT EAR DROPS được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ nano và chứa các thành phần nano bạc và đồng.

Chỉ định sử dụng:

Hỗ trợ điều trị viêm ống thính giác bên ngoài do nhiễm vi khuẩn và nấm bằng cách tạo hàng rào bảo vệ trên bề mặt da.

Cách dùng và liều lượng:

- Sử dụng COLDISEPT EAR DROPS nhỏ tai 3 lần/ ngày, trong ít nhất 3 ngày sau khi các triệu chứng viêm đã hết.
- Nhẹ nhàng làm ấm chai (tốt nhất là dùng tay).
- Nằm xuống với tai của bạn hướng lên trên.
- Nhỏ 5 giọt (trừ khi được bác sĩ yêu cầu khác) và giữ nguyên tư thế này trong 3-5 phút.
- Sử dụng phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Chống chỉ định:

- Không sử dụng sản phẩm nếu màng nhĩ của bạn bị thủng.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào

Cảnh báo và thận trọng:

- Không đưa dụng cụ nhỏ giọt quá sâu vào ống tai.
- Tránh tiếp xúc tình cờ với mắt và miệng.
- Ngừng sử dụng sản phẩm trong trường hợp có bất kỳ triệu chứng đáng báo động nào.
- Không sử dụng sau khi hết hạn.
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát y tế.

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:

Tác dụng phụ không được biết đến, tuy nhiên, ở những người đặc biệt nhạy cảm, không thể loại trừ các triệu chứng dị ứng. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm.

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C, nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em.

Hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 15 ml, có kèm theo ống nhỏ giọt.

Sản xuất bởi:

Tên nhà sản xuất: ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej

Địa chỉ: Nasutów 99C, 21-025 Niemce, Ba Lan